


必ず本説明書を読んだ上で手順の通りに組み立ててください

※説明書と異なる組立を行った場合、製品としての機能が著しく低下するおそれがあります。

HCフェイスシールド 組み立て説明書


外周枠(白部)から製品を取り外してください

フェイスシールド本体 1枚

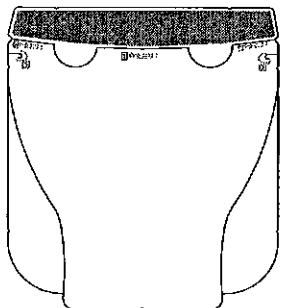

左 右


頭掛けゴム 1本

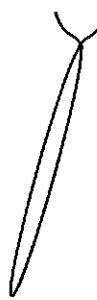

文字が読める向きで①～②の順番で組立


1

①やまおり↑に沿って
青い部分を折り曲げる
360°折り曲げ

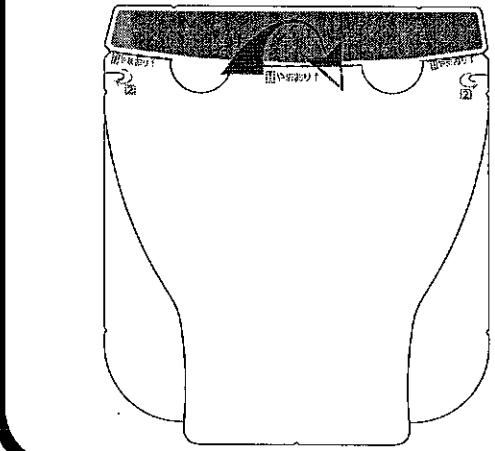

2

折り曲げたまま
②の切込みに頭掛けゴム
を通し、引っ掛ける。

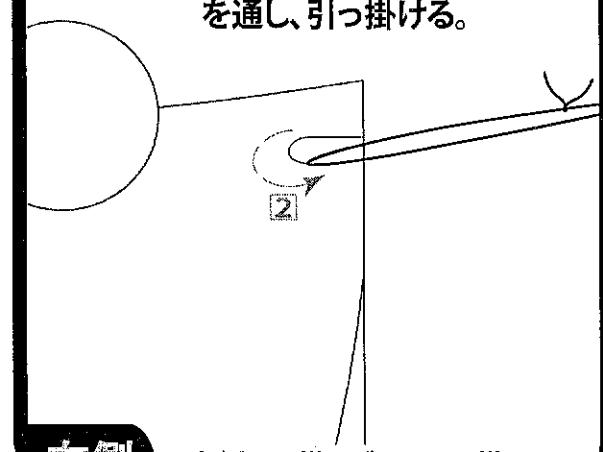

右側

※左側も同様にゴムを引っ掛ける。

3

①で折り曲げた青い部分を額に当てて、頭掛けゴムを後頭部に掛ける。

※装着感がゆるい場合はゴムを結んで長さを変えて調整する。

※髪の毛などが額とシールドの間に挟まると装着感が悪くなり、脱落する危険性があります。

4

使用後は、使用場所や用途に準じた処分を徹底してください。

医療関係：医療廃棄物等の処理方法に準じる。

一般：廃棄物処理業者や自治体のゴミ処理ルールにそって廃棄する。